

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://famed.nt-rt.ru> || fde@nt-rt.ru

Операционные столы SU-10. Описание




Операционный стол

SU-10

Назначение

Операционный стол SU-10 предназначен для поддержки и позиционирования пациента в общей хирургии, сосудистой хирургии, кардиохирургии, нейрохирургии, урологии, проктологии, гинекологии, ларингологии, офтальмологии, эндоскопии, лапароскопии, травматологии, онкологии, стоматологии, пластической хирургии и других хирургических вмешательствах.

Полное предложение специального оборудования – в каталоге «Дополнительные принадлежности для операционных столов».

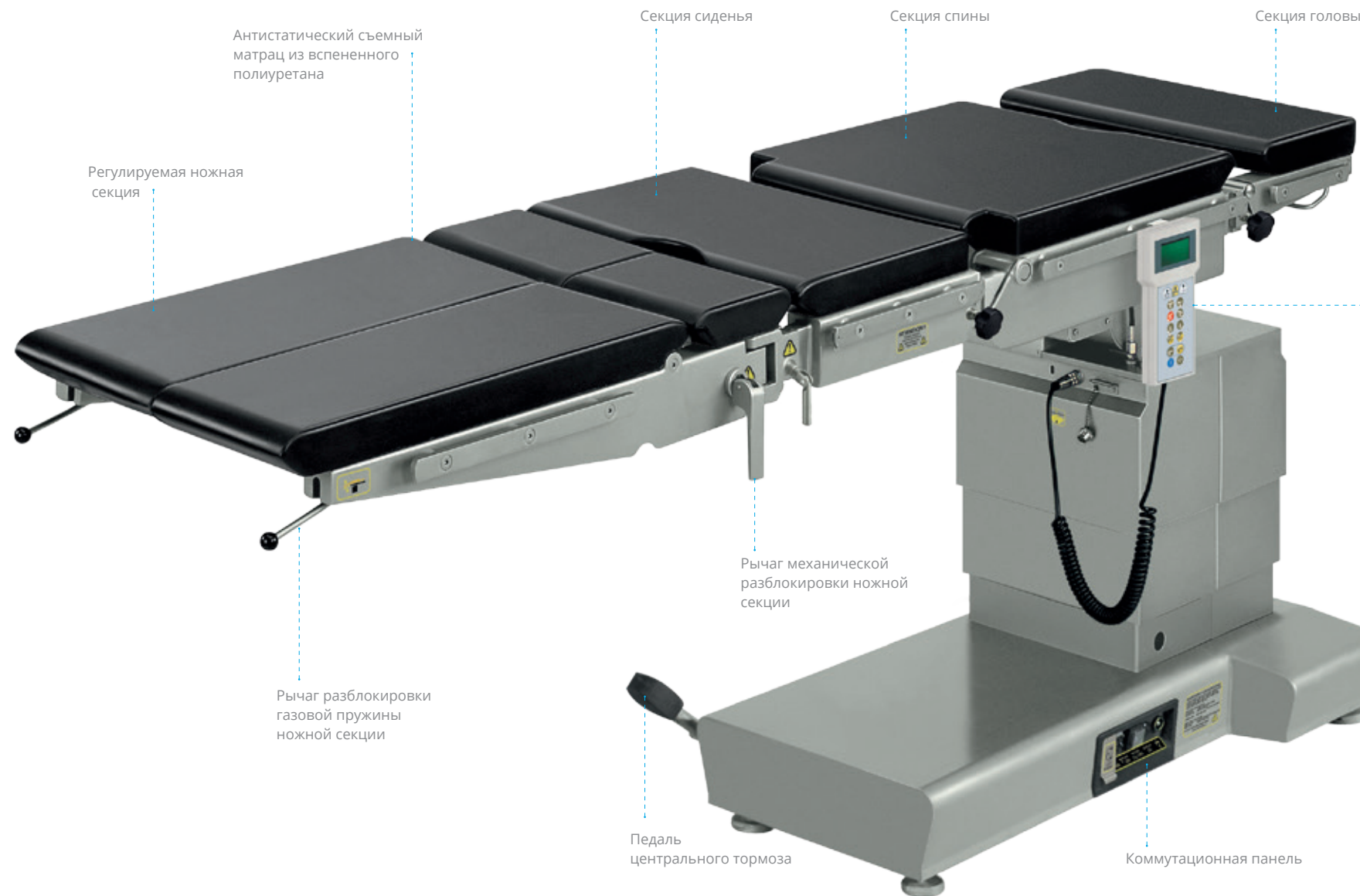

Функциональные регулировки

- Регулировка высоты ложа, боковые наклоны, Тренделенбург, антиТренделенбург, регулировка наклона секции сиденья/спины, выравнивание ложа в положение «0» выполняются электрогидравлической системой со встроенными аккумуляторами (24В/DC).
- Регулировка положений секций головы и ног поддерживается надежными газовыми пружинами с блокировками, а так же механическими блокировками.

Конструкция стола

- Стол изготовлен из кислотоустойчивой матовой нержавеющей стали.
- Мобильное основание стола оснащено центральным тормозом, приводимым в действие ножной педалью.
- Ложе стола не имеет поперечных металлических элементов, что в совокупности с ассиметрично расположенной опорной колонной и взаимозаменяемыми секциями, позволяет осуществлять полный мониторинг пациента с использованием R-аппарата типа C-arm без необходимости продольного смещения ложа.
- Конструкция адаптирована для использования совместно с нейрохирургическими приставками DORO и Mayfield.
- Поверхность ложа стола выполнена из высокопрочного R-проницаемого материала/ Матрацы секций, съемные, бесшовные, антистатические, выполнены из устойчивого к дезинфекции ППУ.
- Все наружные поверхности стола легко моются и устойчивы к воздействию дезинфицирующих средств
- Взаимозаменяемые секции таза, головы и ног, позволяют изменять конфигурацию стола, что значительно расширяет его функциональные возможности.

Пульты управления столом SU-10



Проводной пульт управления с ЖК дисплеем WS-62.6



Беспроводной пульт управления с ЖК дисплеем WS- 63.61

Изменение ориентации стола



Проводной пульт управления оснащен двумя кнопками изменяющими ориентацию стола на 180° в зависимости от текущего положения установки секций головы и ног.

Варианты исполнения SU-10



Альтернативный привод (опция)

Версия стола SU-10 с альтернативным приводом оснащена двумя независимыми системами управления функциями стола: электромеханической и механогидравлической. Альтернативная механогидравлическая система в случае необходимости дублирует регулировку всех электрогидравлических функций. Выбор необходимой функции осуществляется рычагом в основании стола, снабженном интуитивно понятными пиктограммами, а дальнейшая активация функции осуществляется нажатиями на дополнительную ножную педаль.




Панель управления (опция)

Панель управления, установленная на колонне стола, позволяет контролировать функции электрогидравлической системы. Функциональные и информационные пиктограммы на этой панели идентичны пиктограммам на дистанционном пульте управления.

Работа с C-arm

Благодаря ассиметрично расположенной опорной колонне, а также отсутствию поперечных металлических элементов во взаимозаменяемых секциях ложа, во время операции возможен полный мониторинг пациента с использованием R-аппарата типа C-arm без продольного смещения ложа. В свою очередь, отсутствие функции продольного смещения ложа значительно повышает надежность и безопасность конструкции стола.

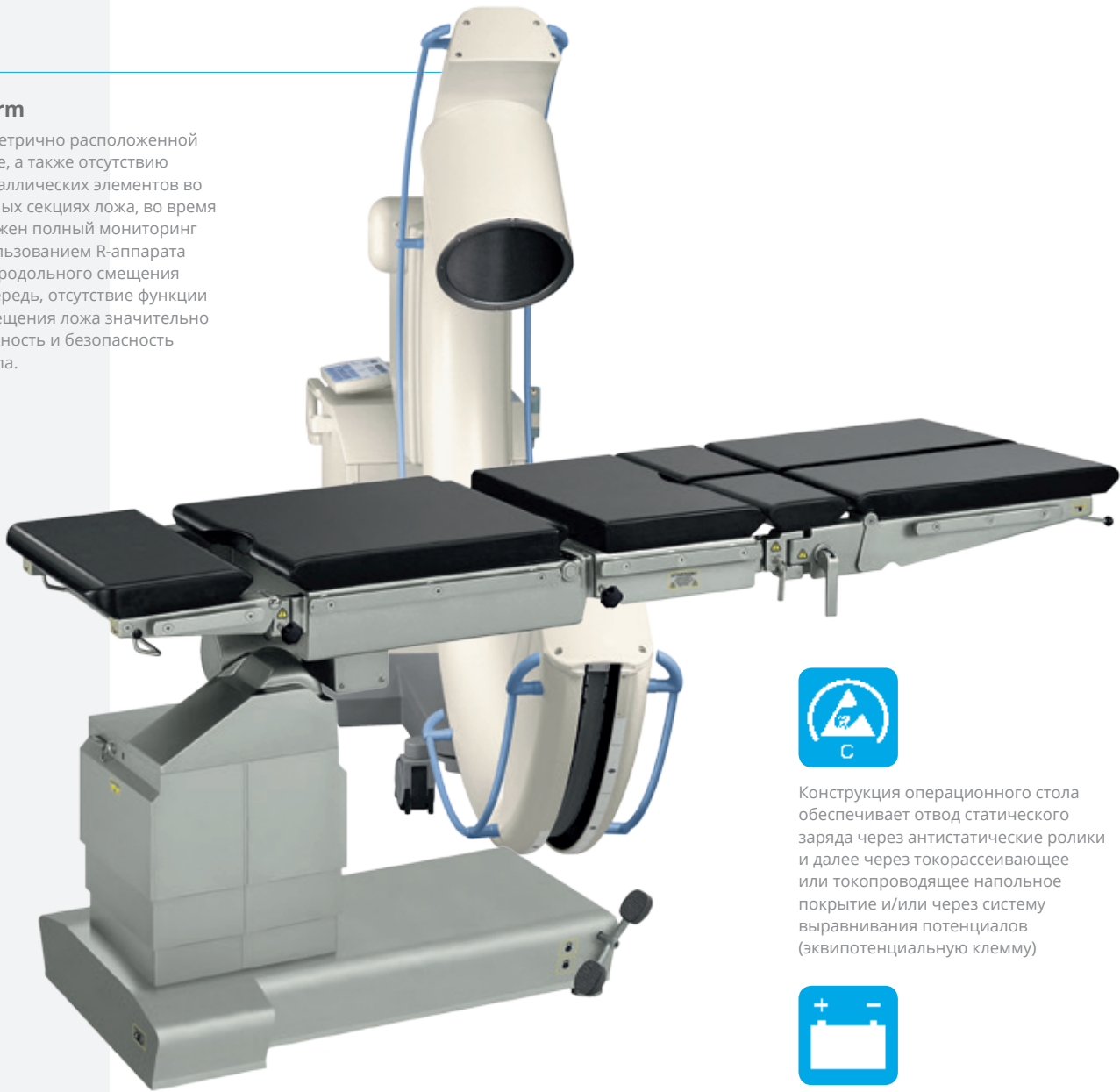

Конструкция операционного стола обеспечивает отвод статического заряда через антистатические ролики и далее через токорассеивающее или токопроводящее напольное покрытие и/или через систему выравнивания потенциалов (эквипотенциальную клемму)



Встроенные аккумуляторные батареи

R-прозрачность



Зона доступная для R-графии с использованием лотка для R-кассеты



Быстросъемные матрасы








Взаимозаменяемые секции ложа

Благодаря функции взаимозаменяемости секций сиденья, ног и головы, возможна конфигурация ложа стола в четырех различных положениях, максимально подходящих для той или иной операции – как показано внизу страницы.




Возможные конфигурации ложа

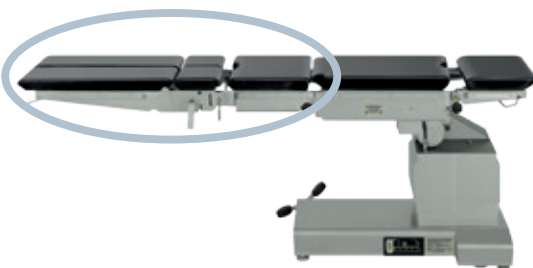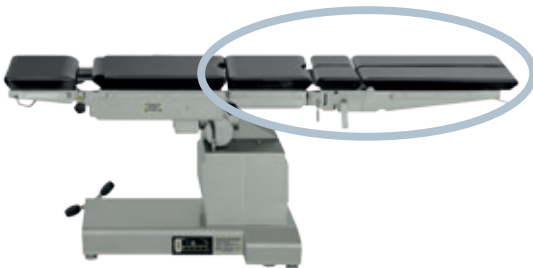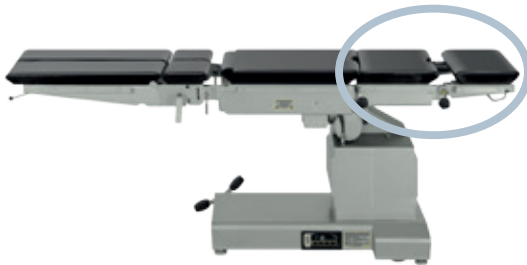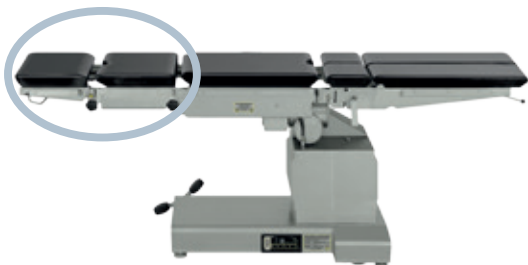

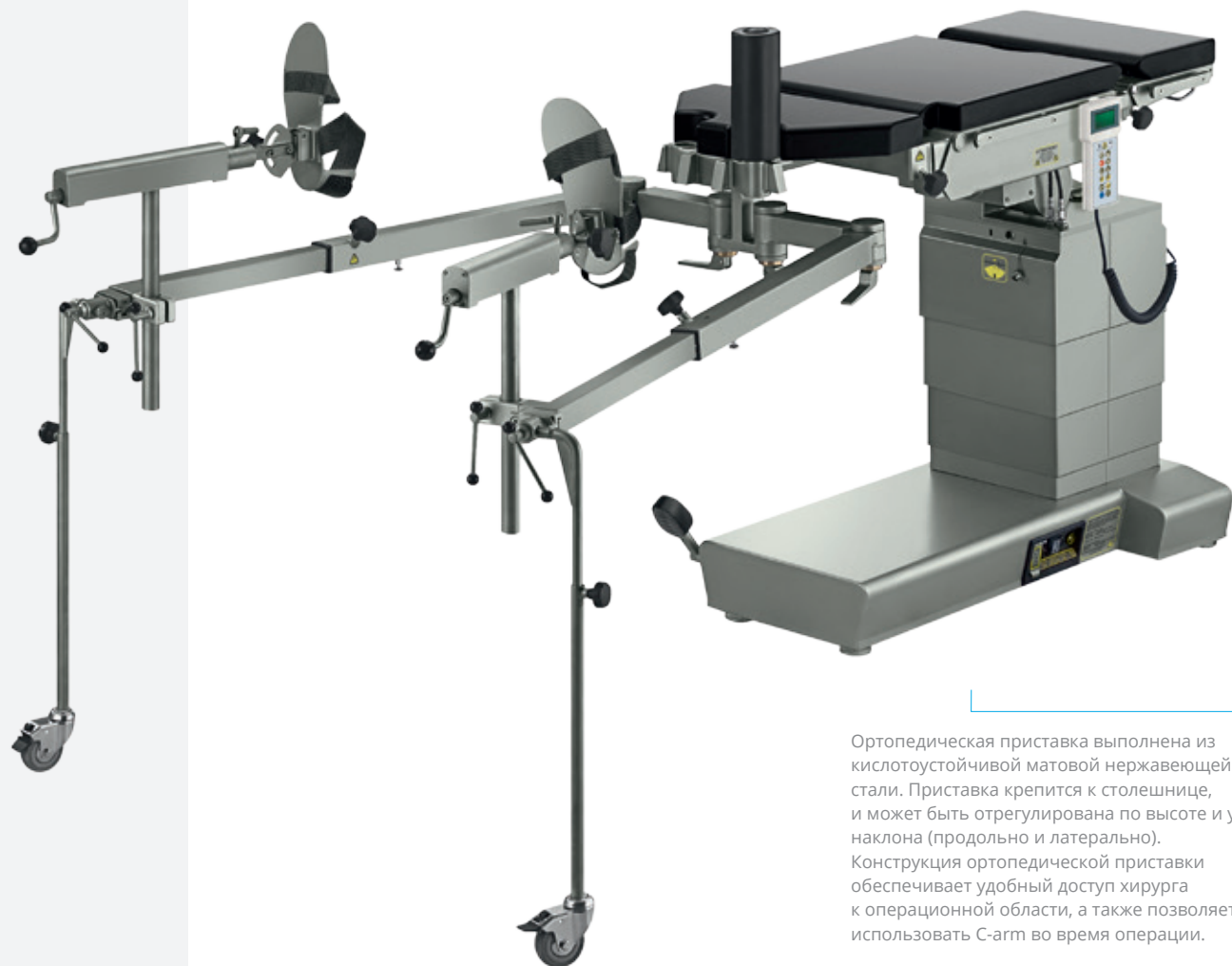

Ортопедическая приставка выполнена из кислотоустойчивой матовой нержавеющей стали. Приставка крепится к столешнице, и может быть отрегулирована по высоте и углу наклона (продольно и латерально). Конструкция ортопедической приставки обеспечивает удобный доступ хирурга к операционной области, а также позволяет использовать C-arm во время операции.


Тренделенбург

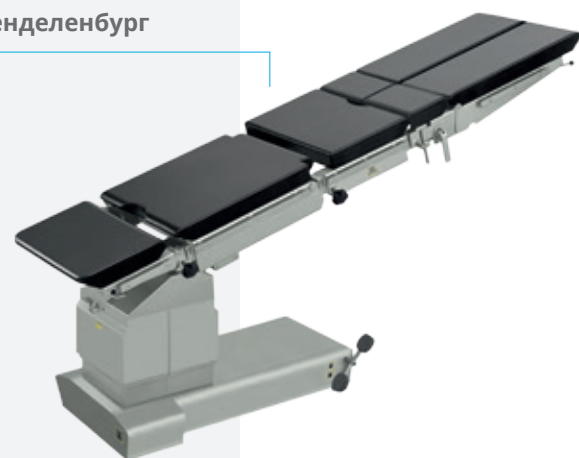

Боковые наклоны



Позиционирование пациента на боку

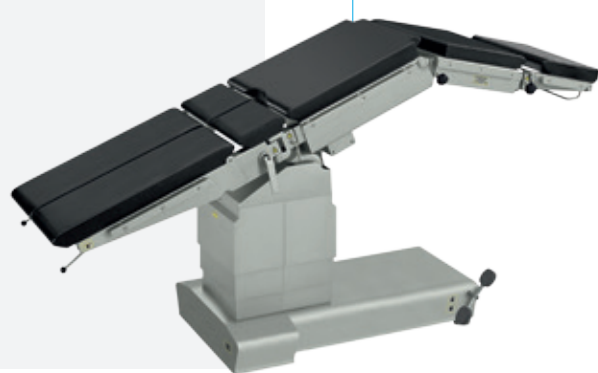

Положение кресла



Варианты использования



Гинекологическое положение с использованием гинекологического лотка WS- 28.5 и опор для колен по Геппелю WS- 05.5



Торакальные и абдоминальные операции



Операции на руке (с использованием дополнительной приставки WS- 48.5)



Операции в области головы и шейного отдела




Положение для лапароскопии (регулировка разделенных ножных секций в горизонтальной и вертикальной плоскостях позволяет добиться необходимого анатомического положения)

Технические характеристики


Общая длина х ширина ложа	2050 x 550 мм
Матрацы секций ширина х толщина	500 x 50 мм
Регулировка высоты ложа	760 до 1170 мм
Тренделенбург	25° / 30°
АнтиТренделенбург	30° / 25°
Боковые наклоны ложа	±20°
Регулировка секция сиденья/спины	-40° до +70°
Регулировка секции головы	-25° до + 50°
Регулировка ножных секций	-90° до +15°
Разведение ножных секций	100°
Напряжение питания батарей	24 В / DC
Электропитание стола	230В ~, 50/60 Гц / AC
Потребляемая мощность	100 ВА
Максимальная допустимая нагрузка	180 кг
Общий вес стола	300 кг



Электрогидравлические функции операционного стола, регулируемые с дистанционного пульта управления

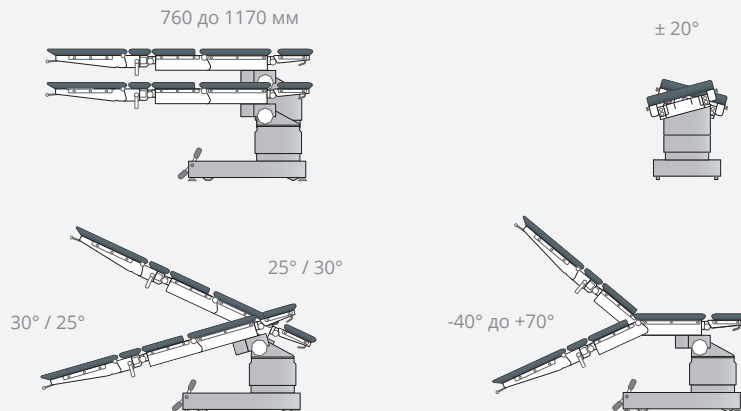

Функции операционного стола регулируемые механически

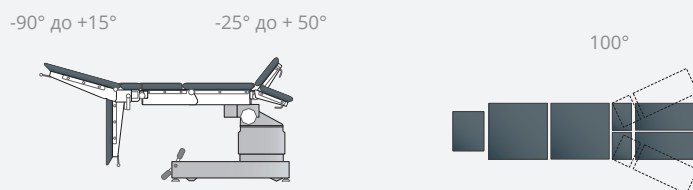

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://famed.nt-rt.ru> || fde@nt-rt.ru