

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://famed.nt-rt.ru> || fde@nt-rt.ru

Операционные столы SU-05. Описание



Операционный стол

SU-05

Назначение

Операционный стол SU- 05 предназначен для поддержки и позиционирования пациента в общей хирургии, сосудистой хирургии, кардиохирургии, нейрохирургии, урологии, проктологии, гинекологии, ларингологии, офтальмологии, эндоскопии, лапароскопии, травматологии, онкологии, стоматологии, пластической хирургии и других хирургических вмешательствах.


Полное предложение специального оборудования – в каталоге «Дополнительные принадлежности для операционных столов».

Конструкция стола

- Стол изготовлен из кислотоустойчивой матовой нержавеющей стали.
- Мобильное основание стола оснащено центральным тормозом, приводимым в действие ножной педалью (в Т-образном основании блокировка осуществляется с помощью четырех выдвижных ножек. В версии основания на 4 больших колесах с одним направляющим колесом реализована трехпозиционная система центрального тормоза).
- Матрацы секций, съемные, бесшовные, антистатические, выполнены из устойчивого к дезинфекции ППУ.
- Поверхность ложа стола выполнена из высокопрочного R-проницаемого материала, что в совокупности с функцией продольного перемещения ложа и взаимозаменяемыми секциями головы и ног, позволяет осуществлять полный мониторинг пациента с использованием R-аппарата типа C-arm.
- Все наружные поверхности стола легко моются и устойчивы к воздействию дезинфицирующих средств
- Взаимозаменяемые секции головы и ног, позволяют изменять конфигурацию стола, что значительно расширяет его функциональные возможности.

Функциональные регулировки

- Регулировка высоты ложа, боковые наклоны, Тренделенбург, антиТренделенбург, наклоны секции спины, регулировка высоты «излома» секции спины, выравнивание ложа в положение «0» выполняются электрогидравлической системой со встроенными аккумуляторами (24В/DC).
- Регулировка продольного смещения ложа относительно колонны стола выполняется электромеханическим приводом.
- Пульт управления оснащен индикатором уровня заряда батареи
- Регулировка положений секций головы поддерживается газовой пружиной с блокировкой
- Регулировка положений секций ног в 5-секционном ложе поддерживается газовыми пружинами с блокировками, а в 6-секционном ложе - механическими блокировками
- Разведение секций ног в горизонтальной плоскости осуществляется механически.

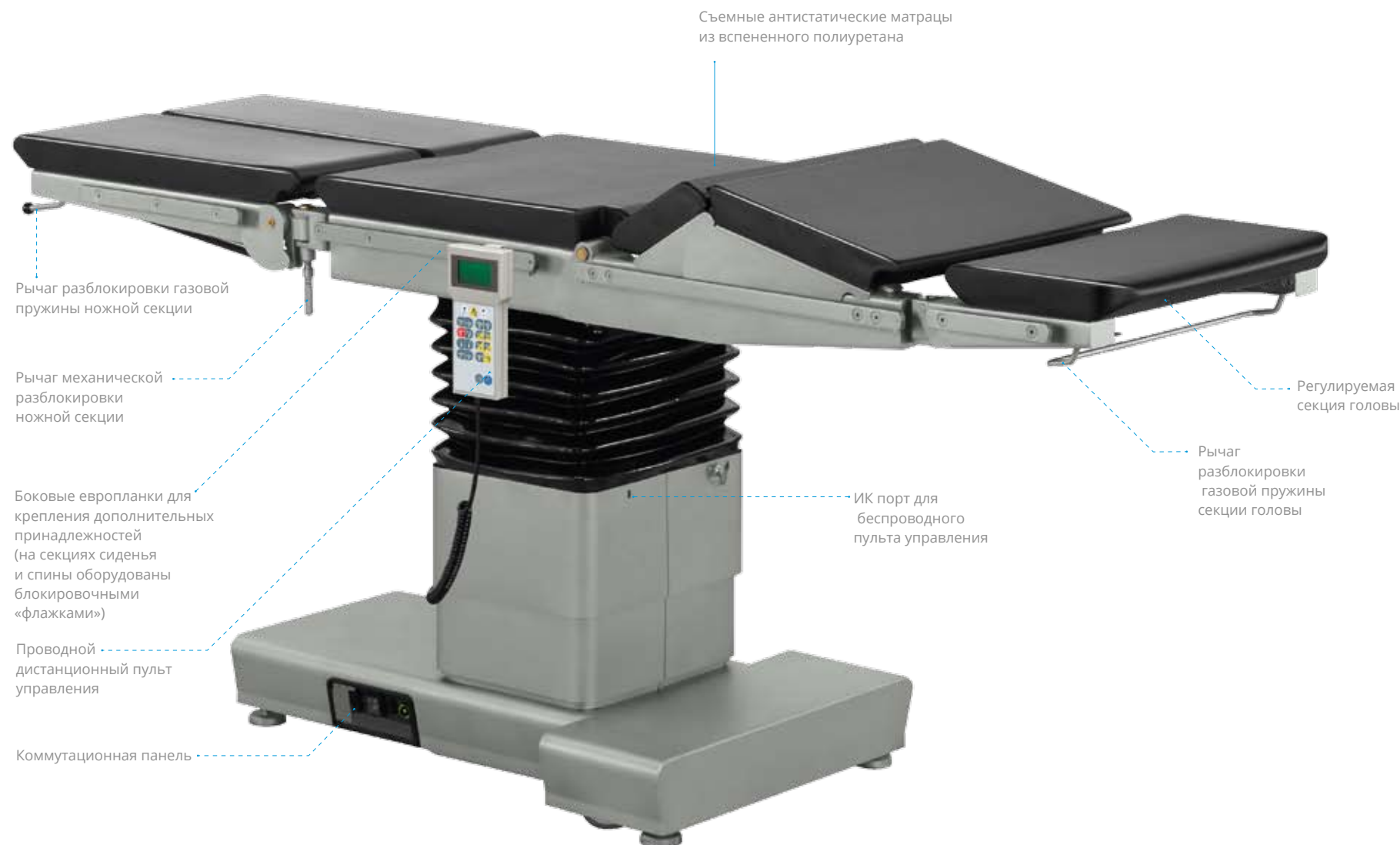

Латеральные наклоны



Тренделенбург и антиТренделенбург



Продольное смещение столешницы относительно колонны стола





Стандартные функции и варианты столешниц


Работа с C-arm

Продольное смещение ложа и ассиметрично расположенная опорная колонна обеспечивают мониторинг пациента с использованием R-аппарата типа C-arm.



Взаимозаменяемые секции головы и ног значительно расширяют функциональные возможности стола

R-прозрачность

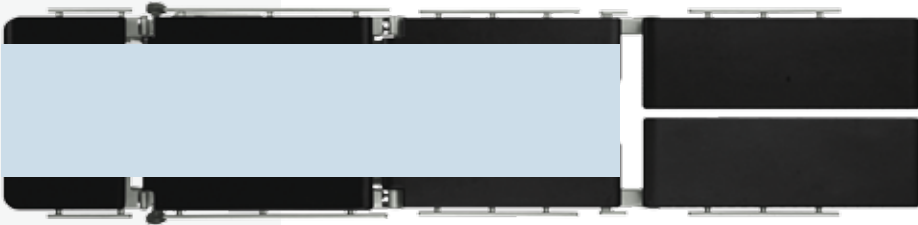

Зона доступная для R-графии с использованием лотка для R-кассеты



Быстросъемные матрасы

Ложа для стола SU-05

Общая длина:

- 5-секционное ложе: 2035 мм
- 6-секционное ложе: 2160 мм

Общая ширина:

- 5-секционное ложе: 550 мм
- 6-секционное ложе: 550 мм

Длина ножных секций

- 5-секционное ложе: 615 мм
- 6-секционное ложе: 750 мм

Столешница BL-20.5 Технические данные:

- Длина ложа (без головного сегмента): 1735 мм
- Ширина ложа: 545 мм
- Регулировка наклонов секции спины: -25° до +80°



5-секционное ложе



6-секционное ложе

Удобный доступ к столу



Конструкция операционного стола обеспечивает отвод статического заряда через антистатические ролики и далее через токорассеивающее или токопроводящее напольное покрытие и/или через систему выравнивания потенциалов (эквипотенциальную клемму)



Встроенные аккумуляторные батареи



Варианты исполнения

- Альтернативный механогидравлический привод регулировок положений
- Основание стола на больших колесах
- Панель управления на колонне стола
- Беспроводная панель управления

Операционный стол
с основанием на больших
колесах (опция)

Ортопедическая приставка

Ортопедическая приставка выполнена из кислотоустойчивой матовой нержавеющей стали. Приставка крепится к столешнице, и может быть отрегулирована по высоте и углу наклона (продольно и латерально). Конструкция ортопедической приставки обеспечивает удобный доступ хирурга к операционной области, а также позволяет использовать C-arm во время операции.



Варианты исполнения SU-05



Альтернативный привод
(опция)

Версия стола SU-05 с альтернативным приводом оснащена двумя независимыми системами управления функциями стола: электромеханической и механогидравлической. Альтернативная механогидравлическая система в случае необходимости дублирует регулировку всех электрогидравлических функций. Выбор необходимой функции осуществляется рычагом в основании стола, снабженным интуитивно понятными пиктограммами, а дальнейшая активация функции осуществляется нажатиями на дополнительную ножную педаль.



Панель
управления
(опция)

Панель управления, установленная на колонне стола, позволяет контролировать функции электрогидравлической системы. Функциональные и информационные пиктограммы на этой панели идентичны пиктограммам на дистанционном пульте управления. Панель оснащена индикатором уровня заряда аккумуляторной батареи.

Варианты использования



Гинекологическое положение с использованием
гинекологического лотка WS- 28.7 и опор для колен по
Геппелю WS- 05.5



Положение сидя с использованием
специальной головной секции WS-21.5



Положение для лапароскопии (регулировка разделенных
ножных секций в горизонтальной и вертикальной плоскостях
позволяет добиться необходимого анатомического положения)



Торакальные и абдоминальные
операции с использованием
«почечного моста»

Пульты управления операционным столом SU-05



Проводной пульт
управления WS-62



Беспроводной пульт
управления WS- 63

Изменение ориентации стола


Проводной пульт управления оснащен двумя кнопками изменяющими ориентацию стола на 180° в зависимости от текущего положения установки секций головы и ног.

Технические характеристики


Общая длина ложа	
• 5-секционное лож	2035 мм
• 6-секционное ложе	2160 мм
Общая ширина ложа	550 мм
Матрацы секций ширина x толщина	500 x 50 мм
Регулировка высоты ложа	740 до 1140 мм
Тренделенбург	40°
АнтиТренделенбург	40°
Регулировка секция спины	-40° до +80°
Регулировка «почечного моста»	150 мм
Регулировка секции головы	-50° до +55°
Регулировка наклонов ножных секций (в 5-секционном ложе)	-90° до +25°
Регулировка наклонов ножных секций (в 6-секционном ложе)	-90° до +90°
Разведение ножных секций	180°
Боковые наклоны ложа	30°
Продольное смещение стола	400 мм
Напряжение питания батарей	24В / DC
Электропитание стола	230В ~ , 50/60 Гц / AC
Потребляемая мощность	100 ВА
Максимальная допустимая нагрузка	250 кг
Общий вес стола	250 кг



Электрогидравлические функции операционного стола, регулируемые с дистанционного пульта управления

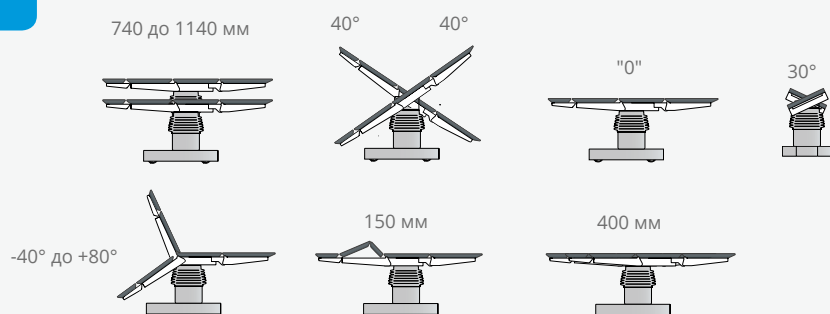

Функции операционного стола регулируемые механически

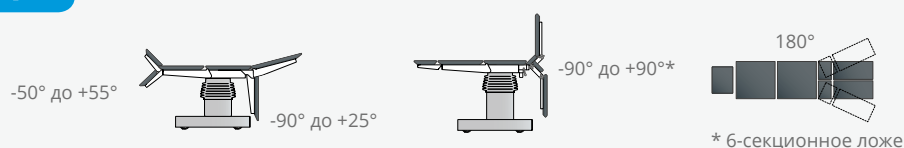

* 6-секционное ложе

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://famed.nt-rt.ru> || fde@nt-rt.ru