

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93


Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://famed.nt-rt.ru> || fde@nt-rt.ru

Больничные койки. Каталог

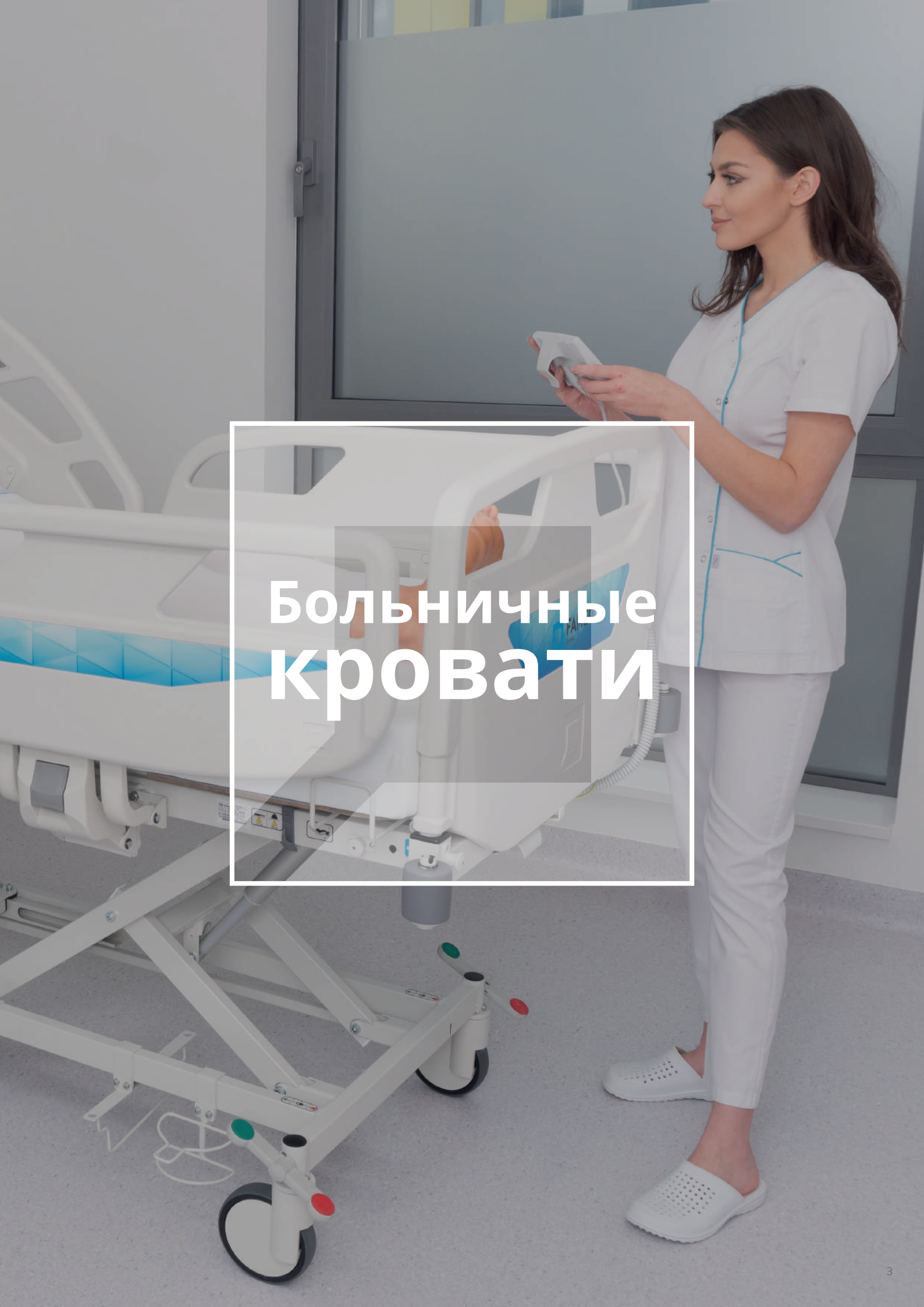A full-page photograph of a female nurse in white scrubs with blue piping, standing next to a modern white hospital bed. She is holding a small white remote control in her hands. The bed has a blue mattress and is mounted on a metal frame with casters. A semi-transparent white box with a thin black border is centered over the bed, containing the text 'Больничные кровати'.

Больничные кровати

Famed LE-13



ИННОВАЦИОННАЯ, СТОЕЧНАЯ, ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КРОВАТЬ ICU С НАКЛОНАМИ

Famed LE-13 это кровать для отделений интенсивной терапии (ОИОМ), конструкция которой опирается на трех стабильных цилиндрических стойках. Кровать оснащено дополнительными терапевтическими функциями, а также комплексом сенсоров, влияющих на повышение безопасности и эффективность осуществляемой медицинской помощи. Она прочная, изготовлена с использованием пластика и лаков с антибактериальными свойствами (pSilver™), а также оснащена легкоочищаемыми прозрачными секциями, пропускающими рентгеновские лучи.



ПОЗИЦИОННАЯ ТЕРАПИЯ

Famed LE-13 предлагает боковые наклоны для позиционной терапии – они облегчают уход за пациентом и исключают неудобство для больничного персонала (например поднимание более тяжелых пациентов, нагрузки на позвоночник). Стабильная стоечная конструкция и продвинутые системы управления обеспечивают высокий уровень безопасности и функциональности. На центральной панели сигнализируется положение секции спины (в углах); при ее наклоне на 30 градусов движение замедляется, позволяя оставить ложе в подходящем положении (терапевтическое требование для разных заболеваний, например пульмонологических).



ЛЕГКОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ

Решения, используемые в Famed LE-13, облегчают каждодневную работу с пациентом: пятое колесо, интегрированная и сертифицированная система взвешивания, легкие для дезинфекции конструктивные элементы, быстро демонтируемые концы, индикаторы ложа или направляющее колесо. Мытье кровати тоже облегчит использование в Famed LE-13 ограждений из пластика ABS и лаки в антибактериальной технологии pSilver™. Эксплуатация кровати возможна через центральную панель (с сенсором концентрации света для лучшей видимости), проводной пульт управления, панели в боковых поручнях и ножные переключатели (опция).



БЕЗОПАСНОСТЬ

За безопасность пациента отвечают надежные приводные узлы и комплексы узлов, низкое положение ложа и максимальная нагрузка до 250 кг. Встроенная в кровать сертифицированная система взвешивания позволит легко выбрать соответствующую дозу лекарства, в то время как аккумулятор fCharge™ даст возможность обслуживания пациента во время транспортировки или в случае пропадания электроснабжения. Такие функции как система вызова и подсветка в основании кровати влияют на комфорт и ощущение безопасности пациента. Кровать оснащена сенсорами, позволяющими осуществлять боковые наклоны, когда боковые ограждения опущены.

1





РАЗНООБРАЗИЕ ПОЛОЖЕНИЙ

- Положение Тренделенбурга (5).
- Положение анти-Тренделенбурга (2),
- Положение Фаулера (1),
- Положение кардиологического кресла (4),
- Боковой наклон (6),
- Электрический CPR (положение «ноль») (3),
- Автоконтур,
- Положение для обследования.



ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Селективная и центральная блокировка электрических функций с уровня центральной панели,
- Возможность удлинения ложа,
- Двойная функция авторегрессии,
- Центральная блокировка колес, пятое колесо и направляющее колесо,
- Сертифицированная система взвешивания,
- Ложе HPL, пропускающее рентгеновские лучи,
- Покрывала проводов и механизмов, облегчающие очистку,
- Опоры спины CPR и ножной секции,
- Крючки для пакетов для сбора физиологических жидкостей,
- Опциональные туннели для кассет РГ,
- Опциональный ножной переключатель.



Длина 2280 мм | Общая ширина 990 мм | Минимальная высота 485 мм | Максимальная высота 885 мм | Угол подъема опоры спины 70° | Регулировка бедренной секции 43° | Боковой наклон 25° | Положение Тренделенбурга 15° | Положение анти-Тренделенбурга 13° | Максимальная нагрузка 250 кг

Famed NANO

БОЛЬНИЧНАЯ КРОВАТЬ С БОГАТЫМИ ОПЦИЯМИ КОНФИГУРАЦИИ С ДВУМЯ СТОЙКАМИ

Famed NANO — это высокофункциональная больничная кровать, которая идеально подойдет для отделений интенсивной, а также общей терапии каждой больницы. Система измерения веса пациента, запрограммированные положения нажатием одной кнопки, система ранней мобилизации пациента или простые в использовании поручни SoftDropPlus™ обеспечивают комфорт и безопасность для пациента, а также облегчают работу медицинскому персоналу. Двухколонное основание обеспечивает устойчивость и позволяет контролировать пациента с легкостью при помощи аппарата РТГ или С-дуги во время госпитализации.



ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Famed NANO был разработан для пациентов, находящихся в отделениях интенсивной терапии и стационарных палатах. Структура, основанная на устойчивом основании, дает медицинскому персоналу долгосрочное изделие для ухода и работы с пациентами, требующими особого подхода. Запрограммированные терапевтические функции, доступные по нажатию кнопки или система ранней мобилизации пациента, значительно облегчают работу и обеспечивают пациентам комфортные условия для выздоровления. Дополнительная система измерения веса позволяет контролировать вес пациента, когда он находится на кровати, а конструкция колонны позволяет использовать прикроватные рентгеновские аппараты.



ПРОСТОТА В ОБСЛУЖИВАНИИ

Центральная панель управления, пульт дистанционного управления или панели управления в боковых ограждениях позволяют в полной мере использовать возможности этой усовершенствованной кровати. Положения, доступные нажатием одной кнопки, боковые поручни SoftDropPlus™, управляемые при помощи одной рукой, или индикаторы угла наклона значительно облегчают работу медицинского персонала. Колонная конструкция, кожухи из ABS и полностью съемные секции ложа кровати облегчают дезинфекцию. Управление в боковых ограждениях, предназначенные для пациентов, которые позволяют работать даже пациентам с нарушениями зрения. Система ранней мобилизации пациента способствует более быстрому выздоровлению и идеально подходит для отделений интенсивной терапии.



БЕЗОПАСНОСТЬ

Боковые ограждения на целой длине предотвращают падение пациента. Постоянное расстояние между поручнями предотвращает защемление пальцев и рук, а 9 мест захвата на боковых ограждениях обеспечивают безопасное и удобное изменение положения и вставание с кровати. Двойная авторегрессия снижает избыточное давление в поясничной области в положении сидя. Пластиковые и лакированные элементы выполнены по антисептической технологии pSilver™. Центральная блокировка колес, возможность блокировки функции кровати на центральной панели или неограниченный доступ к рычагу CPR дает персоналу полный контроль над кроватью.





ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

- Система очень ранней мобилизации пациента;
- Фиксированное расстояние между боковыми ограждениями в соответствии со стандартом (EN 60601-2-52);
- Боковые ограждения управляемые одной рукой;
- Панели управления в боковых ограждениях приспособлены для слепых и слабовидящих;
- Положения доступные при помощи одной кнопки: Антишоковая, Обследование, Сосудистая, Фаулера, CPR и Кардиологическое кресло;
- Возможность блокировки некоторых функций с центральной панели;
- Торцы с блокировкой в раме кровати для большей устойчивости и безопасного вертикального положения пациента;
- Легкий доступ к рычагу CPR;
- Легко снимаемые торцы для дополнительной поддержки пациента во время реанимации;
- Ложе кровати из HPL прозрачное для рентгеновских лучей (MAE 0,39 мм Al);
- Система измерения веса позволяет легко контролировать вес пациентов с точностью до 100 г;
- Все пластиковые и лакированные элементы выполнены по технологии pSilver™.

ТРИ ФАЗА РАННЕЙ МОБИЛИЗАЦИИ ПАЦИЕНТА

Ранняя мобилизация пациентов является неотъемлемой частью любой современной больницы и отделения интенсивной терапии. Famed NANO облегчает пациенту вставание с кровати и выполнение упражнений благодаря специальной панели управления для вертикальной мобилизации, высокому параметру продольного наклона и заблокированным стабильным торцам. Famed NANO может помочь пациенту встать и отойти от кровати, способствуя восстановлению его формы и здоровья.

1

На первом этапе пациент может использовать внутреннюю панель управления, расположенную на боковом ограждении, чтобы поднять спинку до комфортного уровня. Для пациентов в отделениях интенсивной терапии персонал должен выполнять это действие - используя положение 30 ° или выше - для предотвращения вентриальной пневмонии.

2

На втором этапе - с помощью медицинского персонала - можно использовать положение кардиологического кресла. Таким образом, пациент сможет проверить, позволит ли его состояние покинуть кровать на третьем этапе. Установка кровати в положение анти-тренделенбурга позволит пациенту проверить свою способность встать. Используя изножье в качестве опоры стоп, можно сделать несколько основных упражнений, а физиотерапевт может начать программу восстановления мышц.

3

На третьем этапе с помощью персонала и установки кровати в положение анти-тренделенбурга пациент может попробовать встать. Если пациент достаточно сильный, чтобы попытаться самостоятельно встать на ноги, он может воспользоваться специальной панелью управления, расположенной на внешней стороне бокового поручня. Анатомическая опора для рук в боковом поручне оснащена кнопками вверх/вниз, что позволяет поднять пациента до уровня, при котором он сможет встать самостоятельно.

ВАРИАНТЫ УПРАВЛЕНИЯ



Длина 2180 мм | Общая ширина 985 мм | Минимальная высота 390 / 435* мм | Максимальная высота 770 / 805* мм | Угол подъема опоры спины 70° | Регулировка бедренной секции 40° | Положение Тренделенбурга 15° | Положение анти-Тренделенбурга 15° | Максимальная нагрузка 250 kg

* Famed NANO с системой взвешивания пациента.

Famed NEXO



ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ, КОМФОРТНАЯ И ЭКОНОМИЧНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ КРОВАТЬ

Экономичная, электрическая кровать с системой ранней мобилизации изготовлена с мыслью о комфорте и безопасности пациента а также обслуживающего персонала. Famed NEXO отлично подойдет для больничных палат, отделений долговременной терапии, отделений реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ). Новая версия популярной в целом Мира больничной кровати поражает своей простой и высокопрочной конструкцией в сочетании с расширенными функциями и высококачественным материалом.



КОМФОРТ

Famed NEXO предлагает широкий выбор доступных позиций благодаря возможности управления его функциями с помощью центральной панели, проводного пульта дистанционного управления или клавиатуры, расположенной на боковых ограждениях. Позиции активируемые одной кнопкой, боковые ограждения SoftDropPlus™ управляемые одной руки и индикаторы угла наклона обеспечивают комфорт для медицинских работников. Кровать Famed NEXO можно очень быстро опустить в самое низкое положение, благодаря чему лечь и встать с кровати становится еще безопаснее и снижается риск падений. Панель, предназначенная для ранней мобилизации пациента, и вертикализационный режим помогают быстрее восстановиться.



ЭКОНОМИЯ

Famed NEXO это самая универсальная больничная кровать в предложении Famed Żywies, которое можно использовать для госпитализации высоких пациентов (возможность удлинения ложа кровати) или людей с избыточным весом. Продуманная конструкция и бактериостатическая защита, которая обеспечивается благодаря технологии pSilver™ значительно сокращает время дезинфекции и уменьшает количество инфекций в больнице. Легендарное качество изготовления и легкость обслуживания для сервисной службы позволяет устранить неисправность на месте, без использования нестандартных приспособления, что значительно ускоряет ремонт, снижает затраты и предотвращает простой



БЕЗОПАСНОСТЬ

Мы спроектировали экономичную больничную кровать с самыми высокими стандартами безопасности. Famed NEXO обеспечивает высокую максимальную нагрузку (280кг), надежность и безопасность подтвержденные результатами испытаний, проведенных внешними компаниями и отзывами клиентов из почти 100 стран мира. Технология pSilver™ используемая в пластиковых и лакированных элементах гарантирует бактериостатическую защиту на каждом этапе использования. Боковые ограждения расположены по всей длине кровати гарантируют пациенту превосходную защиту а постоянное безопасное расстояние между ними, предотвращает защемление пальцев или рук. Центральная блокировка колес обеспечивает устойчивое положение кровати в помещении. Быстрый демонтаж торцов позволяет на использование их как дополнительная опора CPR под пациентом в случаи реанимации.





ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

- Все пластиковые и лакированные элементы выполнены по технологии pSilver™;
- Система и панель, предназначенные для ранней мобилизации пациентов;
- Боковые ограждения SoftDropPlus™ соответствуют стандарту (EN 60601-2-52);
- Панели управления в боковых ограждениях адаптированы к слепым и слабовидящим;
- Положения доступные при помощи одной кнопки: Антишоковая, Обследование, Сосудистая, Фаулера, CPR и Кардиологическое кресло;
- Функции пульта дистанционного управления и боковых панелей можно заблокировать при помощи центральной панели;
- Торцы с блокировкой в раме кровати для большей устойчивости и безопасного вертикального положения пациента;
- Легкий доступ к рычагу CPR;
- Легко снимаемые торцы для дополнительной поддержки пациента во время реанимации;
- Ложе кровати из HPL прозрачное для рентгеновских лучей (MAE 0,39 мм Al);
- Низкая минимальная высота кровати (всего 390 мм);
- Сигнализация разблокировки колес при подключении кровати к сети (опция);
- Предупреждение о низком заряде батареи;
- Возможность удлинения ложа кровати.

ТРИ ФАЗА РАННЕЙ МОБИЛИЗАЦИИ ПАЦИЕНТА

Не только для ОРИТ

Ранняя мобилизация пациента - важный элемент любой современной больницы. Famed NEXO помогает пациенту вставать с постели и выполнять физические упражнения при помощи специальной панели управления для вертикальной мобилизации, высокие параметры продольных наклонов, устойчивых торцов с возможностью фиксации. Famed NEXO может помочь пациенту встать и отойти от кровати, побуждая его вернуться в форму и выздороветь.

1

На первом этапе, в зависимости от состояния пациента, медперсонал может принять решение поднятия спинной секции до положения 30° или выше, чтобы предотвратить вентильторную пневмонию (ВАП) 5. После нажатия одной кнопки на центральной панели спинная секция кровати поднимется и автоматически остановится при достижении наклона 30°, что облегчит работу медперсонала и обеспечит пациенту наилучшие условия для выздоровления.

2

На втором этапе - при содействии медицинского персонала - кровать займет максимальное положение анти-тренделенбурга, а на завершающем этапе - положение кардиологического кресла. Таким образом, персонал может проверить, позволит ли состояние пациента встать с постели на третьем этапе. Находясь в положении анти-Тренделенбурга (лучший угол 18,5° на рынке), вы сможете проверить способность пациента вставать. Используя наклон или используя торец в качестве опоры для ног, мы можем выполнить некоторые базовые упражнения, а физиотерапевт может начать программу восстановления мышц.

3

На третьем этапе с помощью персонала (3) пациент может попытаться встать. Если пациент достаточно силен, чтобы попытаться встать на ноги, он может использовать специальную панель управления на внешней стороне бокового ограждения (3В). Анатомическая опора для рук на боковом ограждении оснащена кнопками вверх/вниз (3С), позволяющими поднять пациента до уровня, на котором он может постоять самостоятельно. Если пациент слишком слаб, потребуется помощь персонала.

ВАРИАНТЫ УПРАВЛЕНИЯ



Famed LP-02.1


ПРОЧНАЯ БОЛЬНИЧНАЯ И РЕАБИЛИТАЦИОННАЯ КРОВАТЬ

Кровать Famed LP-02.1 предназначена для оснащения больниц, санаториев и реабилитационных учреждений, которые ищут надежного и простого решения. Их можно использовать во время диагностирования, наблюдения и лечения болезней. Кровать оснащена ложем, выполненным из лакированной стали.




КАЧЕСТВО

Покупка кровати Famed LP-02.1 - это выбор известного качества продуктов с фабрики в г. Живец. Это простая кровать, покупка которой удовлетворит потребности Вашего медицинского учреждения и обеспечит непрерывность его функционирования. Ты можешь быть уверен в изделии, которое покупаешь. О каждой фазе производства заботится лаборатория, а конечный продукт дважды проходит контроль качества. Кровать изготавливается полностью на нашей фабрике, и мы контролируем каждый этап ее производства.

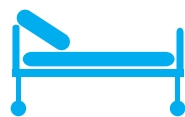

МАТРАСЫ

Мы можем оснастить кровать Famed LP-02.1 пенным матрасом с паропроницаемым водоотталкивающим чехлом или другой, более инновационной моделью - например, пассивный противопролежневый матрас. Матрасы могут быть обшиты чехлом в одном из 13 доступных цветов.

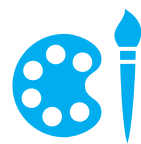

ВАРИАНТЫ КОНЦОВ

Кровать Famed LP-02.1 доступна с тремя вариантами концов: пластиковые концы, из хромированной стали с ламинированной плиткой или из лакированной стали. Боковые поручни предлагаются в двух версиях: из стали - лакированные и хромированные. Цвет и шаблон вставок тоже могут быть подстроены к требованиям клиента в соответствии с доступным образцом.

ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ:


- Матрас с дополнительными свойствами (например пассивный противопролежневый матрас),
- Рукоятка,
- Подвеска для капельницы,
- Рама для вытяжения,
- Центральная блокировка колес или.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Прочная, проверенная конструкция,
- Лак и пластиковые элементы с антибактериальной добавкой в технологии **pSilver™**,
- Безопасный, складной поручень, регулируемая опора спины.



Длина 2190 мм | Общая ширина 965 мм | Минимальная высота 500 мм | Максимальная высота 500 мм | Угол подъема опоры спины 70° | Максимальная нагрузка 170 кг

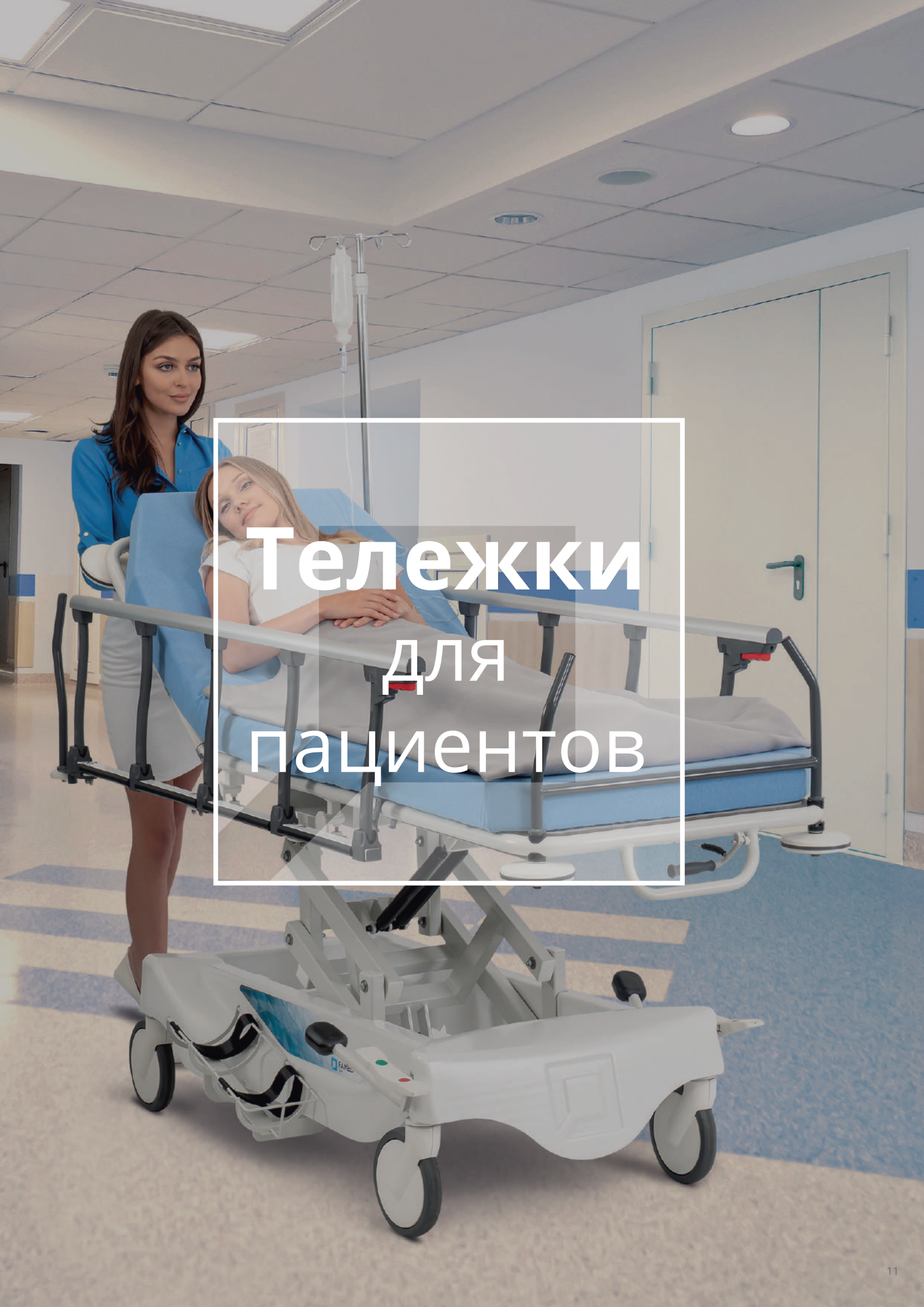
A woman in a blue uniform is pushing a patient on a motorized hospital gurney in a hospital hallway. The gurney is white with blue padding and has a motor at the front. The patient is lying on the gurney, looking towards the camera. The hallway has a tiled floor and a drop ceiling with recessed lights. A door is visible in the background.

Тележки для пациентов

Famed WP-09

ТРАНСПОРТИРОВОЧНАЯ ТЕЛЕЖКА С БОГАТЫМ ВЫБОРОМ ОПЦИЙ

Famed WP-09 это тележка со стоечной конструкцией для транспортировки пациентов между залами в больницах и клиниках. Стабильная конструкция позволяет использовать ее в качестве простого манипуляционного стола. Она оснащена прозрачными плитами HPL, пропускающими.

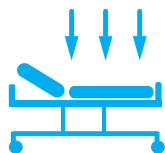

ВОЗМОЖНОСТЬ ВИЗУАЛИЗАЦИИ

Сегменты кровати заполнены рентгенопрозрачной ламинатной доской. Возможно наблюдение за грудной клеткой пациента с помощью рентгеновского аппарата C-arm. Колончатая конструкция не только облегчает визуализацию, но и повышает устойчивость тележки и улучшает параметр максимальной нагрузки.



ЛЕГКОСТЬ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ

Тележка оснащена четырьмя колесами с центральной блокировкой, с одним колесом для движения прямо – идеально для тесных коридоров и частого изменения места эксплуатации. Большой диаметр колес облегчает преодоление препятствий и неровностей. Дооснащение тележки Famed WP-09 опциональным пятым колесом также сделает его использование более эффективным.



ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

Тележка Famed WP-09 производится в Польше. Все производство находится в фабрике в г.Живец, обеспечивая нам постоянную возможность контролировать качество наших изделий. Компоненты самого высокого качества защитят Ваше приобретение от износа и обеспечат многолетнюю, бесперебойную работу.



ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ:

- Боковые поручни, покрытые хромом,
- Ремни для поддержки пациента,
- 4-секционное ложе,
- Пятое колесо,
- Подвеска для капельницы,
- Нестандартные, более высокие матрасы.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Регулировка высоты гидравлическими приводами (ножной рычаг),
- Опора спины, регулируемая газовыми пружинами,
- Положение Тренделенбурга и анти-Тренделенбурга, достигаемое путем гидравлического привода,
- Регулировка бедренной секции (газовая пружина),
- Регулировка секции для голени (в 4-секционном ложе, храповой механизм)
- Центральная блокировка колес, доступная с каждой стороны,
- Молниеносное складание поручней с сохранением безопасного пространства,
- Туннель для кассеты РГ.



Длина 2100 мм | Общая ширина 800 мм | Минимальная высота 560 мм | Максимальная высота 890 мм | Угол подъема опоры спины 70°
Регулировка бедренной секции 30° | Положение Тренделенбурга 15° | Положение анти-Тренделенбурга 15° | Максимальная нагрузка 250 кг

Famed SPARK

ЭРГОНОМИЧНАЯ И ЭКОНОМИЧНАЯ ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ПАЦИЕНТОВ

Famed SPARK – это принципиально новая конструкция, проверенная в десятках стран: экономичная, функциональная и прочная тележка для транспортировки пациентов. Антибактериальные свойства синтетических материалов и лакированных элементов сочетаются с низкими затратами на обслуживание и непревзойдённой долговечностью.



ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Тележка совместима с мобильными рентгеновскими аппаратами и позволяет монтаж опциональных туннелей для рентгеновских кассет. Рычаги регулировки высоты, доступные с обеих сторон тележки, позволяют наблюдать за пациентом в процессе изменения высоты. Опционально доступен матрас с защитными ремнями и ручками для переноски пациента с одного медицинского изделия на другое. На выбор имеются простые в использовании двухсегментные (WP-02.0) и трёхсегментные (WP-02.1) лежа для лёгкого позиционирования. Вместительная корзина для вещей пациента, расположенная в основании тележки, позволяет поддерживать порядок.

ОПЦИОНАЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ:

- штатив для капельницы,
- пятое колесо,
- штатив для полотенца,
- держатель для кислородного баллона,
- туннели для рентгеновских кассет,
- полка для монитора,
- матрас для переноски пациента,
- защитный ремень для пациента,
- два дополнительных рычага блокировки,
- складные ручки для ведения от головы.

СВОЙСТВА:

- регулировка высоты гидравлическим сервомотором,
- сегмент спины регулируется газовыми пружинами,
- наклон тренделенбурга и анти-тренделенбурга регулируется газовыми пружинами,
- к двум рычагам блокировки колёс имеется лёгкий доступ с трёх сторон тележки,
- поручень SafeDrop™ длиной 1500 мм,
- отсутствие щели с кроватью при перекладывании пациента.



БЕЗОПАСНОСТЬ

Боковые поручни защищают пациента на протяжении более 1500 мм и не имеют острых краёв и опасных мест, в которых могут застрять пальцы. Большая максимально допустимая нагрузка (SWL) 250 кг позволяет безопасно транспортировать самых тяжёлых пациентов вместе с необходимым оборудованием. Антибактериальная технология с содержанием серебра pSilver™ в лаке, пластиковых элементах и наматраснике облегчает дезинфекцию и препятствует развитию бактерий. Большие колёса обеспечивают устойчивость и облегчают транспортировку.



ЛЁГКОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Отсутствие щели между кроватью и тележкой при перекладывании пациента позволяет минимизировать усилия медицинского персонала и риск падения. Поручни опускаются ниже лежа, что облегчает безопасное соскальзывание с матраса при вставании и защищает поручни от повреждений. Две пары ручек для ведения тележки и ручка на сегменте спины позволяют удобно маневрировать тележкой по коридорам больницы. Направляющее колесо и опциональное пятое колесо облегчают транспортировку пациента и качение тележки в тесных коридорах.



Длина 2040 мм | Общая ширина 790 мм | Минимальная высота 600 мм | Максимальная высота 900 мм | Угол подъёма сегмента спины 70°
Наклон тренделенбурга 23° | Наклон анти-тренделенбурга 12° | Максимальная нагрузка 250 кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

	Famed LE-13	Famed NANO
Длина	2280 мм	2180 мм
Общая ширина	990 мм	985 мм
Регулировка высоты	485 - 885мм	390 - 770 мм 435 - 805 мм (взвешенная версия)
Угол подъема опоры спины	70°	70°
Регулировка бедренной секции	43°	40°
Боковой наклон	25°	-
Положение Тренделенбурга	15°	15°
Положение анти-Тренделенбурга	13°	15°
Диаметр колес	150 мм	150 мм
Максимальная нагрузка	250 kg	250 kg
Опции управления	Проводной пульт управления, центральная панель, панели в поручнях, ножной переключатель	проводной пульт дистанционного управления, центральная панель, панели в боковых ограждениях, панель для ранней мобилизации пациента, ножное управление

Технологии, используемые в изделиях:



fCharge™

Все источники питания изделий Famed Żywies выбирают у проверенного поставщика, с которым мы сотрудничаем на протяжении многих лет. Каждая батарея **fCharge™** проходит проверку во внешней фирме, потом подвергается многочисленным тестам в нескольких технологических отделах нашей фабрики. Встроенное в изделия зарядное устройство с технологией быстрого заряжения **fCharge™** позволяет быстро обеспечить необходимое количество питания для осуществления регулировки. Высокое число гарантированных рабочих циклов обеспечивает безопасность в случае перерыва питания в больнице.



SoftDropPlus™

Система SoftDropPlus™ - это безопасность и комфорт при работе с больничной кроватью от Famed Żywies. Благодаря использованию газовых пружин с механизмом замедления, боковые ограждения опускаются в нижнее положение управляемым образом. В результате движение получается плавным, бесшумным и безопасным для пациента. При помощи одной руки можно с легкостью опустить боковые ограждения вниз. Выбор решения SoftDropPlus™ позволяет сэкономить место по бокам кровати, поскольку ограждения складываются максимально близко к раме кровати. Контурные ручки в боковых ограждениях максимально облегчают вставание из положения лежа, а также вставание с кровати. Специально предназначенная клавиатура управления для пациента с выступами на клавишах, значительно облегчают использование слепым и слабовидящим пациентам. Специальная система ранней мобилизации позволяет быстрее вернуться в форму пациенту.



pSilver™

Все элементы с пластика ABS произведено с использованием технологии **pSilver™**. Полуфабрикат с наночастицами серебра, который мы используем в процессе формования, обеспечивает эффективную бактериостатическую защиту. Использование технологии **pSilver™** в местах, к которым пациентка дотрагивается чаще всего, ограничивает размножение опасных бактерий, грибов или вирусов. **pSilver™** - это также процесс обработки пластиковых элементов, обеспечивающий гладкую поверхность, структура которой препятствует скоплению загрязнений.

Famed NEXO	Famed LP-02.1	Famed WP-09	Famed SPARK WP-02
2180 (+325) мм	2190 мм	2100 мм	2040 мм
985 мм	965 мм	800 мм	790 мм
390 - 800 мм	500 мм	560 - 890 мм	600 - 900 мм
70°	70°	70°	70°
40°	-	30°	(Ножная секция) -35°
-	-	-	-
16,5°	-	15°	23°
18,5°	-	15°	12°
150 мм	125 мм	200 мм	200 мм
280 kg	170 kg	250 kg	250 kg
проводной пульт дистанционного управления, центральная панель, панели в боковых ограждениях, панель для ранней мобилизации пациента, ножное управление	-	-	-



SafeDrop™

Боковые поручни **SafeDrop™** опускаются ниже ложа по всей своей длине, не создавая препятствий для пациента при спуске с тележки. Тщательно продуманная конструкция практически полностью исключает пространство, возникающее после приближения тележки к больничной койке или операционному столу. Барьеры SafeDrop™ идеально взаимодействуют с поручнями наших кроватей. Всё это обеспечивает большую безопасность пациентов и требует меньших физических усилий от персонала. Поручни SafeDrop™ можно опускать и поднимать одной рукой. Обтекаемая форма и отсутствие острых краёв обеспечивают безопасность и предотвращают порезы и случайные прижатия пальцев.

Функция авторегрессии

Механизм регулировки опоры спины и голени оснащен системой обратного движения, отводящего пункт поддержки поясничного сегмента и позволяющего установить удобное расстояние между сидением и сегментом, поддерживающим голени. Эта функция определяется как двойная авторегрессия и служит для уменьшения чрезмерного давления в зоне поясничного сегмента и голени в сидячем положении. Чрезмерное давление на ткани ведет к повреждению капилляров, и в конечном итоге вызывает повреждение этих тканей и появления ран и язв, является одной из причин пролежней. Уменьшение давления - это профилактическое действие в противпролежневой терапии и терапии, поддерживающей быстрое выздоровление пациента.



Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://famed.nt-rt.ru> || fde@nt-rt.ru